



# Diaphragme Caya

## le bon positionnement

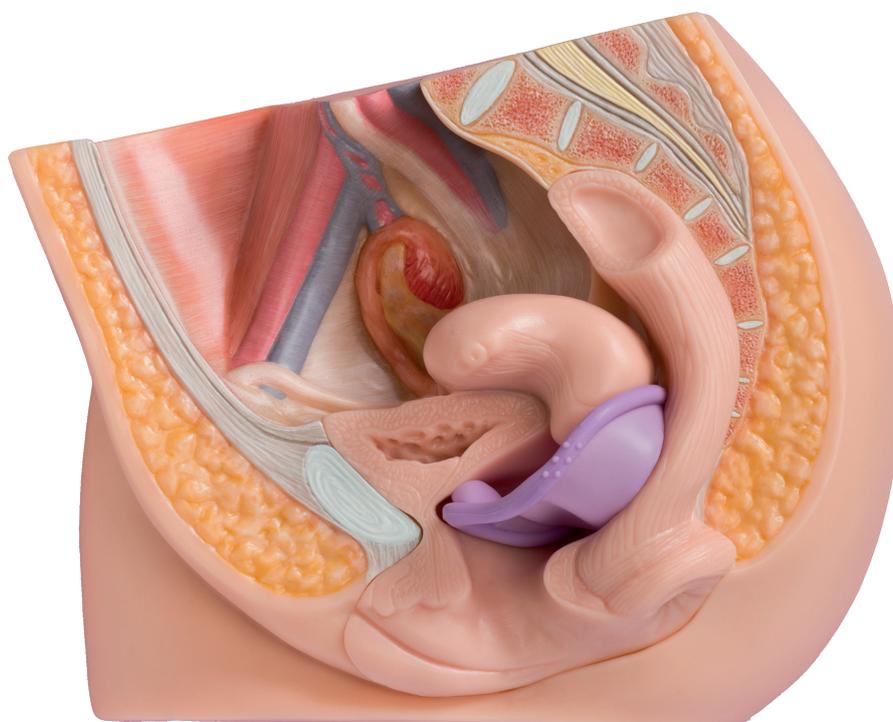

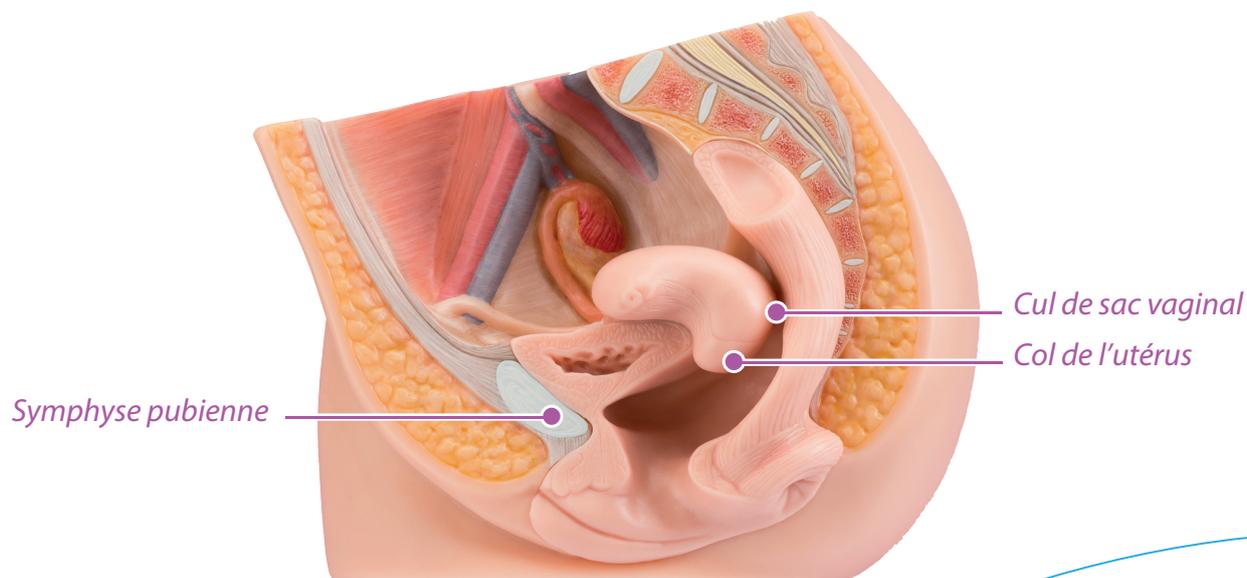

## DIAPHRAGME CAYA

- Sûr
- Sans hormones
- Taille unique

Le diaphragme Caya est vendu exclusivement sur ordonnance en pharmacie. Il doit toujours être utilisé avec un gel contraceptif. Sur la base de remboursement de 3,14 €. Réutilisable pendant 2 ans.

ACL : 5169956

Prix conseillé : 39,95 €

## CAYAGEL

Gel contraceptif à base d'acide lactique et de cellulose

ACL : 5169962

Prix conseillé : 12,95 €

### UTILISATION DE CAYA

- Mettre 4 ml de gel contraceptif dans Caya.
- Il est plié et poussé (la flèche vers le corps) jusqu'au fond du vagin.
- Il est placé entre l'arrière de la symphyse pubienne et le cul-de-sac vaginal en recouvrant le col de l'utérus.
- Il peut être placé jusqu'à 2 heures ou juste avant le rapport sexuel.
- Il est recommandé de remettre du Cayagel en cas de rapports consécutifs à l'aide de l'applicateur.
- Le diaphragme doit être gardé au moins 6 heures après le rapport (durée de vie des spermatozoïdes dans le vagin).

### TRIPLE SÉCURITÉ

- 1 • **Membrane en silicone :**  
barrière mécanique
- 2 • **Cellulose dans Cayagel :**  
2<sup>ème</sup> barrière mécanique au niveau du col de l'utérus
- 3 • **Acide lactique dans Cayagel :**  
immobilisation des spermatozoïdes

### AVANT PRESCRIPTION : CONTRE-INDICATIONS

- Pendant les 6 semaines post-partum.
- Femme utilisant un diaphragme de taille 60 ou supérieure à 80 mm (2,7% des femmes).
- Prolapsus très important.
- Fossette rétro symphysaire trop peu prononcée ou inexistante.
- Infections urinaires fréquentes.

### APRÈS PRESCRIPTION : VISITE DE CONTRÔLE

- Vérifier la taille
  - Si trop grand :
    - Rentre difficilement dans le vagin
    - Sort du vagin
    - Gêne
  - Si trop petit :
    - Ne reste pas en place entre la symphyse et le cul-de-sac
- Si le doute persiste, contactez-nous pour vous procurer des anneaux de mesure.
- Vérifier le positionnement : 80% des femmes arrivent à la positionner correctement dès la première utilisation.
  - Doit recouvrir le col
  - Doit être placé entre la symphyse pubienne et le cul-de-sac vaginal

